


JOY TEST Rychlý antigenní test na 8 respiračních patogenů (LFIA) Samotestování

*Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.
Pro samotestování.
Pouze pro diagnostické použití in vitro.*

Postup testování

- Před testováním nechte soupravu vytemperovat na pokojovou teplotu. Umyjte si ruce a osušte je.
- Zkontrolujte datum expirace na krabici nebo fóliovém sáčku. Zkontrolujte, že obsah testovací soupravy nebyl dříve použitý; tyto jednorázové materiály nelze použít opakovaně. Sáček neotevírejte, dokud nejste připraveni test provést.
- Odtrhněte uzávěr zkumavky s lyžačním pufrém a vložte ji do stojánku na zkumavky.
- Odběr vzorku: Otevřete obal se sterilním tamponem. Nedotýkejte se bavlněné špičky a tampon vyjměte za plastovou rukojeť.
- Vložte tampon do nosní dírký přibližně 2,5 cm hluboko. Dbejte na to, abyste odebrali případný přítomný nosní sekret. Opatrně otáčejte tamponem kruhovým pohybem po vnitřní straně nosní dírký alespoň 5x. Stejným tamponem postup zopakujte v druhé nosní dírce.
- Po odběru vzorku vložte bavlněnou špičku tamponu do zkumavky s lyžačním pufrém a 10x tamponem otočte proti vnitřní stěně zkumavky.
- Stlaďte stěny zkumavky kolem tamponu 5x, aby se vzorek zcela uvolnil do pufru.
- Při vytahování tamponu jej přitlačte ke stěně zkumavky, aby ve zkumavce zůstalo co nejvíce vzorku.
- Vyjměte a zlikvidujte tampon. Zkumavku uzavřete kapátkem.
- Nakapejte 4 kapky, přibližně 100 µL, do každé ze 3 jamek pro vzorek na testovací kazetě. Výsledky odečtete po 15 minutách. Po 20 minutách již výsledky neodečítejte. Poznámka: Pokud nakápnutá kapka obsahuje vzduchové bubliny, přidejte do jamky další kapku.
- Po testování vložte všechny použité materiály do biologicky bezpečnostního sáčku a dobře jej uzavřete. Uzavřený sáček vyhoďte do nádoby na odpad v souladu s místními předpisy.

Vyhodnocení výsledků

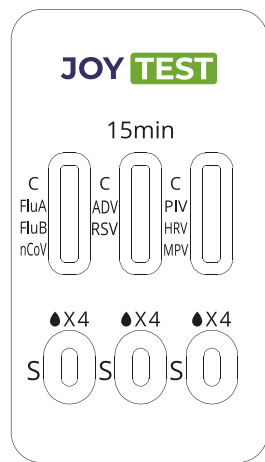

Pro SARS-CoV-2 a chřipku A/B (vlevo)							Pro ADV/RSV (uprostřed)			Pro PIV/HRV(RhV)/MPV(hMPV) (vpravo)						
„C“: kontrolní čárka „FluA“: testovací čárka pro chřipku A „FluB“: testovací čárka pro chřipku B „nCoV“: testovací čárka pro SARS-CoV-2 „S“: jamka pro vzorek							„C“: kontrolní čárka „ADV“: testovací čárka pro adenovirus „RSV“: testovací čárka pro respirační syncytiální virus „S“: jamka pro vzorek			„C“: kontrolní čárka „PIV“: testovací čárka pro parainfluenzu „HRV“: testovací čárka pro rhinovirus (RhV) „MPV“: testovací čárka pro metapneumovirus „S“: jamka pro vzorek						
Pozitivní																
Negativní																
Neplatný																

Negativní výsledek: Pokud se zobrazí pouze kontrolní čárka C a testovací čárka není viditelná, vzorek neobsahuje SARS-CoV-2, chřipku A, chřipku B, ADV, RSV, PIV, HRV (RhV) ani MPV (hMPV), nebo je jejich koncentrace nižší než limit detekce. Výsledek je negativní.

Pozitivní výsledek:

Pozitivní výsledek SARS-CoV-2: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka nCoV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen SARS-CoV-2 a výsledek pro SARS-CoV-2 je pozitivní.

Pozitivní výsledek chřipky A: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka Flu A), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen chřipky A a výsledek pro chřipku A je pozitivní.

Pozitivní výsledek chřipky B: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka Flu B), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen chřipky B a výsledek pro chřipku B je pozitivní.

Pozitivní výsledek ADV: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka ADV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen adenoviru (ADV) a výsledek pro ADV je pozitivní.

Pozitivní výsledek RSV: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka RSV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen respiračního syncytiálního viru (RSV) a výsledek pro RSV je pozitivní.

Pozitivní výsledek PIV: Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka PIV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen viru parainfluenzy (PIV) a výsledek pro PIV je pozitivní.

Pozitivní výsledek HRV (RhV): Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka HRV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen lidského rhinoviru (HRV/RhV) a výsledek pro HRV je pozitivní.

Pozitivní výsledek MPV (hMPV): Pokud se současně zobrazí kontrolní čárka (čárka C) a testovací čárka (čárka MPV), znamená to, že byl ve vzorku detekován antigen metapneumoviru (MPV/hMPV) a výsledek pro MPV je pozitivní.

Pokud se zobrazí kontrolní čárka C a v oblasti testovacích čárek se zobrazí více červených čárek, znamená to, že vzorek obsahuje více respiračních patogenů.

Neplatný výsledek: Pokud se čárka C nezobrazí, výsledek je neplatný a je nutné provést nový test.


***Poznámka:**

Intenzita zbarvení v oblasti testovacích čárek (čárka nCoV / čárka Flu A / čárka Flu B) se bude lišit podle koncentrace antigenu SARS-CoV-2, antigenu chřipky A a antigenu chřipky B. Výsledek se stanoví podle toho, zda se testovací čárka vytvořila, bez ohledu na intenzitu jejího zbarvení. Jakákoli intenzita zbarvení v testovací oblasti (čárka nCoV / čárka Flu A / čárka Flu B) se proto považuje za pozitivní výsledek.

Intenzita zbarvení v oblasti testovacích čárek (čárka ADV / čárka RSV) se bude lišit podle koncentrace antigenu ADV a antigenu RSV. Výsledek se stanoví podle toho, zda se testovací čárka vytvořila, bez ohledu na intenzitu jejího zbarvení. Jakákoli intenzita zbarvení v testovací oblasti (čárka ADV / čárka RSV) se proto považuje za pozitivní výsledek.

Intenzita zbarvení v oblasti testovacích čárek (čárka PIV / čárka HRV / čárka MPV) se bude lišit podle koncentrace antigenu PIV, antigenu HRV (RhV) a antigenu MPV (hMPV). Výsledek se stanoví podle toho, zda se testovací čárka vytvořila, bez ohledu na intenzitu jejího zbarvení. Jakákoli intenzita zbarvení v testovací oblasti (čárka PIV / čárka HRV / čárka MPV) se proto považuje za pozitivní výsledek.

Obsah testovací soupravy

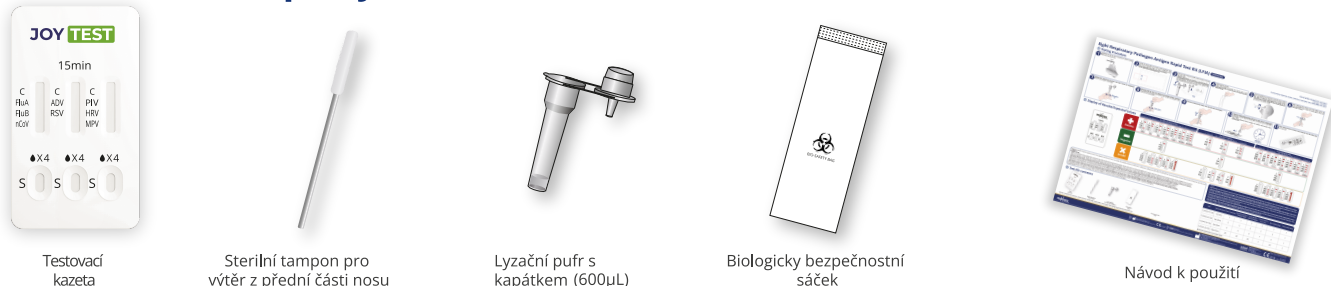

Testovací sada obsahuje testovací kazetu, sterilní tampon pro výtěr z přední části nosu, lyžační pufr s kapátkem (600µL), biologicky bezpečný sáček a návod k použití.

REF	Specifikace	Testovací kazeta	Sterilní tampon pro výtěr z přední části nosu	Lyžační pufr s kapátkem	Návod k použití	Biologicky bezpečnostní sáček
JOY81S1	1ks/krabice	1	1	1	1	1

Potřebný materiál, který není součástí balení: časovač.