

CZ  
Č. IFU-DOA-S-05, verze S/0

## JOY TEST

### 4v1 Test na drogy ze slin

#### Návod k použití

REF: JOY41D1S

Testované látky: **THC, KRA, COT, ALC**

Vzorok: ľudské sliny

Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.

Vhodné pro samostatování.

*Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Test poskytuje pouze předběžný orientační výsledek a není určen pro stanovení diagnózy, klinické rozhodování ani terapeutické účely.*

#### URČENÉ POUŽITÍ

JOYTEST 4v1 test na drogy ze slin je rychlý imunochromatografický screeningový test určený k orientačnímu zjištění přítomnosti vybraných drog a jejich metabolitů v lidských slinách. Test je určen pro osobní, nemedicínské a orientační použití. Výsledek testu je kvalitativní, tedy pouze ukazuje, zda je koncentrace testované látky ve vzorku slin nad nebo pod stanovenou mezí hodnotou testu (cut-off), případně orientačně odpovídá barevné škále u alkoholu. Test neurčuje přesnou koncentraci látky ve slinách, míru intoxikace, dobu užívání ani způsob užívání látky.

Mezi hodnoty testu (cut-off) a látky, na které je test kalibrován, jsou uvedeny v následující tabulce:

| Testovaná látka | Zkratka | Kalibrátor                     | Mezní hodnota/cut-off |
|-----------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Marihuana       | THC     | 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH | 15 ng/ml              |
| Kratom          | KRA     | mitragynin                     | 100 ng/ml             |
| Kotinin         | COT     | kotinin                        | 50 ng/ml              |
| Alkohol         | ALC     | alkohol                        | 0,02%                 |

Tento produkt není určen pro in vitro diagnostiku, klinické použití, stanovení diagnózy, léčbu ani rozhodování o zdravotním stavu. V případě potřeby potvrzení výsledku je nutné použít specializovanou laboratorní analytickou metodu.

#### SHRNUTÍ TESTOVANÝCH LÁTEK

Níže uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. Nejděná se o zdravotnické doporučení, diagnózu ani úplný popis účinků jednotlivých látek. Doba detekce ve slinách je vždy pouze orientační a může se lišit podle množství užití látky, četnosti užívání, způsobu užívání, metabolismu, zdravotního stavu, doby od posledního užívání, použití mezi hodnotou testu a dalších individuálních faktorů. Test neslouží k posouzení aktuální schopnosti řídit vozidlo, obsluhovat stroje ani vykonávat jiné rizikové činnosti.

**Marihuana / THC**  
THC, tedy  $\Delta^9$ -tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní složka konopí. Test je kalibrován na 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH, metabolit THC uvedený v tabulce výše. Ve slinách může být THC nebo související látky detekovatelné krátko po užití, zejména v důsledku přímého kontaktu látky s dutinou ústní při kouření, vapořování nebo jiném způsobu užívání. Některé zdroje uvádějí možnost detekce THC ve slinách až po dobu přibližně 14 hodin po užití, tato doba je však pouze orientační a může se výrazně lišit. Užití THC může ovlivňovat vnímání, reakční dobu, koordinaci, paměť, pozornost a úsudek.

#### Kratom / KRA

Kratom je rostlinný materiál získávaný z rostliny Mitragyna speciosa. Mezi hlavní sledované látky patří mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Test je kalibrován na mitragynin uvedený v

tabulce výše. Přítomnost látek souvisejících s kratomem ve slinách může záviset na množství užití látky, době užití, metabolismu a dalších individuálních faktorech. Užívání kratomu může ovlivnit bdělost, vnímání, reakční dobu, soustředění a schopnost bezpečně vykonávat rizikové činnosti.

#### Kotinin / COT

Kotinin je hlavní metabolit nikotinu. Test je kalibrován na kotinin uvedený v tabulce výše. Přítomnost kotininu ve slinách může souviset s užíváním tabákových nebo nikotinových výrobků, případně s expozicí tabákovému kouři. Kotinin má opoiti nikotinu delší dobu přetrvávání a může být ve slinách detekovatelný orientačně až 1–2 dní po expozici. Doba detekce se však může lišit podle míry expozice, metabolismu a dalších individuálních faktorů.

#### Alkohol / ALC

Alkoholový indikátor slouží k orientačnímu zjištění přítomnosti alkoholu ve slinách. Reakční ploška mění barvu podle přibližné koncentrace alkoholu ve vzorku. Výsledek se porovnává s barevnou škálou dodanou samostatně nebo vytlačenou na obalu produktu. Test orientačně detekuje alkohol od hodnoty přibližně 0,02 %. Výsledek je pouze orientační a neurčuje přesnou hladinu alkoholu v krvi, míru intoxikace ani schopnost osoby bezpečně řídit, pracovat nebo vykonávat rizikové činnosti.

#### PRINCIP TESTU

JOYTEST 4v1 test na drogy ze slin využívá v testovacích proužcích THC, KRA a COT princip imunochromatografické reakce založené na kompetitivní vazbě. Testovací zařízení je určeno k orientační detekci vybraných látek a jejich metabolitů ve vzorku lidských slin. Vzorek slin je absorbován sběrnou částí testovacího zařízení a postupuje testem kapilárními působením. Pokud je koncentrace testované látky ve vzorku pod mezní hodnotou testu, vytvoří se v příslušné testovací oblasti (T) barevná linie. Pokud je koncentrace testované látky ve vzorku na úrovni mezní hodnoty testu nebo nad ní, příslušná testovací linie (T) se nevytvoří. V kontrolní oblasti (C) se musí vždy objevit kontrolní linie. Kontrolní linie potvrzuje, že byl použit dostatečný objem vzorku a že test proběhl správně.

#### PRINCIP ALKOHOLOVÉHO TESTU

Alkoholový indikátor je tvořen reakční ploškou, která při kontaktu se slinami obsahujícími alkohol mění barvu podle přibližné koncentrace alkoholu ve vzorku. Výsledek se otečtá porovnáním zbarvení reakční plošky s barevnou škálou dodanou samostatně nebo vytištěnou na obalu produktu.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

- Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
- Pouze pro použití se vzorkem lidských slin.
- Test je určen pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.
- Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Nepoužívejte test, pokud je ochranný sáček poškozený, otevřený nebo jinak narušený.
- Po otevření v uzavřeném ochranném sáčku až do okamžiku použití.
- Test nepoužívejte, než čekáte a nepolykajte.
- Test nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené do 1 hodiny.
- Nemíchejte komponenty z různých sadů.
- Nedotýkejte se absorpční, reakční ani alkoholové indikační části testovacího zařízení.
- Test nekladte do úst hbitoující, než je nutné pro odebrt slin podle návodu.
- Test nekousajte, než čekáte a nepolykajte.
- Test nekousajte, než čekáte a nepolykajte.
- Test není určen k požití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě požití s rozporováním barev požádejte o pomoc s odečtením výsledku jinou osobu.
- Nedodržte postup, času odečtu nebo podmínek skladování může vést k nesprávnému výsledku.
- Po použití zlikvidujte test v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Alkoholový indikátor je citlivý na přítomnost alkoholu v okolním prostředí. Test neprovádějte v prostředí s výpary alkoholu, dezinfekcí, parfémy nebo jiných přípravků obsahujících alkohol.

#### OBSAH BALENÍ

Dodávaný materiál:

1× testovací zařízení

1× návod k použití + barevná karta pro odečet alkoholu (pokud není vytištěna na obalu)

Potřebný materiál, který není součástí balení:

1× časovač

#### SKLADOVÁNÍ A STABILITA

- Skládejte v původním obalu při teplotě 2–30 °C.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem.
- Nemrazte.
- Test je stabilní do data expirace uvedeného na obalu, pokud je skladován za předepsaných podmínek.
- Po otevření ochranného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

#### SKLADOVÁNÍ A STABILITA ALKOHOLOVÉHO TESTU

Alkoholový indikátor skládáje v uzavřeném ochranném sáčku při teplotě 2–30 °C. Skladování při teplotě nad 30 °C může ovlivnit funkci alkoholového testu. Pokud byl test skladován v chladu, nechte jej před otevřením sáčku dosáhnout pokojové teploty.

#### ODEBRĚ A PŘÍPRAVA VZORKU

Nejméně 10 minut před odebrém vzorku nevykládejte nic do úst. Před testováním nejzte, nepijte, nežvýkajte žvýkačku, nekuste, nepoužívejte tabákové ani nikotinové výrobky, nepoužívejte istnu vodu a nevyplachujte ústa. Pro tento test nepoužívejte žádné jiné ochranné pomůcky. Vzorek slin lze odebrat kdykoliv během dne. Test proveďte podle níže uvedeného postupu ihned po otevření ochranného sáčku. Pokud je v ústech nedostatečné množství slin, může být odebrt pomaleji. Nedodržení pokynů před odebrém nebo nedostatečné množství vzorku může vést k neplatnému nebo nesprávnému výsledku.

#### PROVEDENÍ TESTU

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Ujistěte se, že testovací zařízení má pokojovou teplotu. Test provádějte při teplotě 10–30 °C.
- Nejméně 10 minut před testováním nevykládejte nic do úst, nejzte, nepijte, nekuste a nežvýkajte žvýkačku.
- Vyjměte testovací zařízení z uzavřeného ochranného sáčku. Test použijte co nejdříve.
- Uchopte testovací zařízení za držadlo a sejměte kryt, aby byla odhalena absorpční sběrná část.
- Vložte absorpční sběrnou část do úst a několik sekund ji stírejte vnitřní stranou obou tváří a jazyk. Poté umístěte absorpční sběrnou část doprostřed úst a pokračujte ve sběru slin. Absorpční část se má dotýkat jazyka nebo být umístěna pod jazykem.
- Během odebrání držte testovací zařízení vodorovně podle vyobrazeného postupu. Nesprávná poloha testu při odebru může vést k nesprávnému výsledku.
- Držte test v ústech, abyste nešli, než je nutné pro odebrt slin podle návodu.
- Test nepoužívejte, než čekáte a nepolykajte.
- Položte testovací zařízení na čistou a rovnou plochu.
- Spusťte časovač.
- Výsledek testovacích proužků odečtete mezi 5 a 10 minutou.
- Nedodržte výsledek testovacích proužků po uplynutí 10 minut. Výsledek odečtený po této době nemusí být platný.
- Výsledek alkoholového indikátoru odečtete do 1 minuty, pokud je na testu značka ALC.
- Porovnejte barvu reakční plošky s barevnou škálou dodanou samostatně nebo vytištěnou na obalu produktu.

6. Znamení negativní výsledek, že ve vzorku nejsou žádné stopy testovaných látek? Nie nepolykajte. Testovaná látka může být přítomná v koncentraci nižší, než je mezní hodnota testu, nebo mimo detekční možnosti testu.

7. Laz použít test po expiraci? Ne. Po uplynutí doby použitelnosti nelze zaručit správnou funkci testu.

#### LIKVIDACE

Použitý test a související materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Použitý test považujte za potenciálně biologicky rizikový materiál. Test je jednorázový a nesmí být použit opakovaně.

#### VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

|  |                                |            |                                                                    |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Přečtěte si návod k použití    | <b>LOT</b> | Číslo šarže                                                        |
|  | Nepoužívejte opakovaně         |            | Datum výroby                                                       |
|  | Skládací teplota               |            | Obsahuje množství postačující pro <=> testů                        |
|  | Výrobce                        |            | Spotřebuje do                                                      |
|  | Chraňte před slunečním zářením |            | Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a iře se s návodem k použití |
|  | Uchovávejte v suchu            |            | Zmnožený zástupce Evropské unie                                    |
|  | Dovozce                        |            |                                                                    |

**ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.**  
No. 777 Jingshang Road, High-Tech Development Zone, 230088  
Hefei, Anhui, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
E-mail:sales@dbluemedical.com

**MedUnion S.L.**  
Carrer de Tapioles,33, 2-1, Barcelona, 08004, Spain  
SRN: ES-AR-000019366  
rep@themedunion.com

**Czech Original Products s.r.o. - JOYMED.cz**  
Koulova 6, Praha 6, 160 00, Česká republika  
IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771  
www.joymed.cz obchod@joymed.cz  
+420 608 284 065

Datum revize: 25. 6. 2026

SK  
Č. IFU-DOA-S-05, verze S/0

## JOY TEST

### 4v1 Test na drogy zo slin

#### Návod na použitie

REF: JOY41D1S

Testované látky: **THC, KRA, COT, ALC**

Vzorok: ľudské sliny

Iba na orientačné použitie. Nie je určený na diagnostické účely.

Vhodné na samodiaľgnotovanie.

*Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Test poskytuje iba predbežný orientačný výsledok a nie je určený na stanovenie diagnózy, klinické rozhodovanie ani o terapeutické účely.*

#### URČENÉ POUŽITIE

JOYTEST 4v1 test na drogy zo slin je rýchly imunochromatografický skríningový test určený na orientačné zistenie prítomnosti vybraných drog a ich metabolitov v ľudských slinách. Test je určený na osobné, nemedicínske a orientačné použitie. Výsledek testu je kvalitatívny, t.j. iba ukazuje, či je koncentrácia testovanej látky vo vzorku slin nad alebo pod stanovenou hraničnou hodnotou testu (cut-off), prípadne orientačne zodpovedá farebnej stupnici pre alkohol. Test neurčuje presnú koncentráciu látky v slinách, stupeň intoxikácie, dobu užívania ani spôsob užívania látky.

Hraničné hodnoty testu (cut-off) a látky, na ktoré je test kalibrován, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Testovaná látka | Skratka | Kalibrátor                     | Hraničná hodnota/cut-off |
|-----------------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| Marihuana       | THC     | 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH | 15 ng/ml                 |
| Kratom          | KRA     | mitragynin                     | 100 ng/ml                |
| Kotinin         | COT     | kotinin                        | 50 ng/ml                 |
| Alkohol         | ALC     | alkohol                        | 0,02 %                   |

Tento produkt nie je určený na in vitro diagnostiku, klinické použitie, stanovenie diagnózy, liečbu ani rozhodovanie o zdravotnom stavu. V prípade potreby potvrdenia výsledku je nutné použiť specializovanú laboratornú analytickú metódu.

#### PREHĽAD TESTOVANÝCH LÁTEK

Níže uvedené informácie slúžia iba na všeobecnú orientáciu. Nejděná sa o zdravotné odporúčania, diagnózu ani úplný popis účinkov jednotlivých látok. Doba detekcie v slinách je vždy iba orientačná a môže sa líšiť v závislosti od množstva užití látky, frekvencie užívania, spôsobu užívania, metabolismu, zdravotného stavu, času od posledného užívania, použiteľných prahových hodnôt testu a ďalších individuálnych faktorov. Test neslúži na posúdenie aktuálnej schopnosti viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje ani vykonávať iné rizikové činnosti.

**Marihuana / THC**  
THC, teda  $\Delta^9$ -tetrahydrokanabinol, je hlavná psychoaktívna zložka konope. Test je kalibrován na 11-nor- $\Delta^9$ -THC-9-COOH, metabolit THC uvedený v tabuľke výšje. V slinách môže byť THC alebo súvisiace látky detekovateľné krátko po užití, najmä v dôsledku priameho kontaktu látky s dutinou ústnou pri fajčení, vapořování alebo inom spôsobe užívania. Některé zdroje uvádajú možnosť detekcie THC v slinách až približne 14 hodín po užití, táto doba je však iba orientačná a môže sa výrazne líšiť. Užívanie THC môže ovplyvňovať vnímanie, reakčný čas, koordináciu, pamäť, pozornosť a úsudok.

#### Kratom / KRA

Kratom je rastlinný materiál získavaný z rastliny Mitragyna speciosa. Medzi hlavné

sledované látky patria mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Test je kalibrován na mitragynin uvedený v tabuľke výšje. Přítomnosť látok súvisiacich s kratomem v slinách môže závisieť od množstva užívania látky, času od užívania, metabolismu a ďalších individuálnych faktorov. Užívanie kratomu môže ovplyvniť bdeľosť, vnímanie, reakčný čas, sústredenie a schopnosť bezpečne vykonávať rizikové činnosti.

#### Kotinin / COT

Kotinin je hlavný metabolit nikotínu. Test je kalibrován na kotinin uvedený v tabuľke výšje. Přítomnosť kotininu v slinách môže súvisieť s užívaním tabákových alebo nikotinových výrobkov, prípadne s vystavením tabakovému dymu. Kotinin má v porovnaní s nikotínom dlhšiu dobu perzistencie a v slinách môže byť orientačne detekovateľný až 1–2 dní po expozícii. Doba detekcie sa však môže líšiť v závislosti od miery expozície, metabolismu a ďalších individuálnych faktorov.

#### Alkohol / ALC

Indikátor alkoholu slúži na orientačné zistenie prítomnosti alkoholu v slinách. Reakčná plocha mení farbu v závislosti od približnej koncentrácie alkoholu vo vzorku. Výsledek sa porovnáva s farebnou škálou dodávanou samostatne alebo vytlačenu na obale výrobku. Test orientačne detekuje alkohol od hodnoty približne 0,02 %. Výsledek je iba orientačný a neurčuje presnú hladinu alkoholu v krvi, stupeň intoxikácie ani schopnosť osoby bezpečne viesť vozidlo, pracovať alebo vykonávať rizikové činnosti.

#### PRINCÍP TESTOVANIA

Test na drogy zo slin JOYTEST 4v1 využíva pri testovacích proužkoch THC, KRA a COT princíp imunochromatografickej reakcie založenej na kompetitívnej väzbe. Testovacie zariadenie je určené na orientačnú detekciu vybraných látok a ich metabolitov vo vzorku ľudských slin. Vzorek slin je absorbovaný časťou testovacieho zariadenia a postupuje testom kapilárnym pôsobením. Ak je koncentrácia testovanej látky vo vzorku pod prahovou hodnotou testu, v príslušnej testovacej oblasti (T) sa vytvorí farebná čiara. Ak je koncentrácia testovanej látky vo vzorku na úrovni prahovej hodnoty testu alebo nad ňou, príslušná testovacia čiarka (T) sa nevytvorí. V kontrolnej oblasti (C) sa musí vždy objaviť kontrolná čiarka. Kontrolná čiarka potvrdzuje, že bol použitý dostatočný objem vzorky a že test prebehol správne.

#### PRINCÍP ALKOHOLOVÉHO TESTU

Indikátor alkoholu posudzujú reakčnej plochy, ktoré pri kontakte so slinami obsahujúcimi alkohol mení farbu v závislosti od približnej koncentrácie alkoholu vo vzorku. Výsledek sa otečtá porovnaním zbarvenia reakčnej plochy s farebnou škálou dodanou samostatne alebo vytlačenou na obale výrobku.

#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA

- Iba na orientačné použitie. Nie je určený na diagnostické účely.
- Určenie výsledku na použitie so vzorkom ľudských slin.
- Test je určený na jednorázové použitie. Nepoužívať ho opakovane.
- Test nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
- Test nepoužívať, ak je ochranný sáček poškodený, otvorený alebo inak narušený.
- Test nechať v uzavretom ochrannom vrecku až do okamihu použitia.
- Po otvorení ochranného vrecka test použite čo najskôr, najneskôr do 1 hodiny.
- Nemíchejte komponenty z rôznych sadů.
- Nedotýkajte sa absorpčnej, reakčnej ani alkoholovej indikačnej časti testovacieho zariadenia.
- Test nekladte do úst hbitšie, ako je potrebné na odber slin podľa návodu.
- Test nehyzte, nežuťte a nepolykajte.
- Test nie je určený na požitie.
- Uchovávaťe mimo dosahu detí.
- Uchovávaťe mimo dosahu detí.
- AK máte problémy s rozporovaním farieb, požiadajte inú osobu o pomoc pri odočítaní výsledku.
- Nedodržanie postupu, času odočítania alebo podmienok skladovania môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- Po použití zlikvidujte test v súlade s miestnymi predpismi o nakládani s odpadom.

#### Negatívny výsledek

Test nepolykajte, ak je alkoholový indikátor zabarvený nad nanesením vzorky slin. **Poznámka:** Ak sa zabarvia iba vonkajšie okraje alkoholového indikátora a väčšina reakčnej plochy zostane bez zabarvenia, test zopakujte s novým testovacím zariadením, aby bola zabezpečená dostatočná saturácia reakčnej plochy slinami. Test je určený iba na jednorázové použitie a nesmie sa používať opakovane.

#### KONTROLNÁ KVALITA

Kontrolná čiara (C) slúži ako interná kontrola postupu pri testovacích proužkoch THC, KRA a COT. Jej zobrazenie potvrdzuje, že bol použitý dostatočný objem vzorky a že vzorka správne prešla príslušným testovacím proužkom.

#### OBMEDZENIA METÓDY

- Test poskytuje iba kvalitatívny, predbežný a orientačný výsledek. Indikátor alkoholu poskytuje iba orientačné farebné porovnanie.
- Test neurčuje presnú koncentráciu testovaných látok v slinách ani presnú hladinu alkoholu v krvi.
- Positívny výsledek neznamená stupeň intoxikácie, spôsob užívania, dobu užívania ani množstvo užití látky.
- Negatívny výsledek nevyklučuje prítomnosť testovanej látky vo vzorku. Látka môže byť prítomná v množstve nižšom ako je prahová hodnota testu.
- Test nemusí rozlišovať medzi rôznymi zdrojmi expozície testovanej látky. Některé lieky, potraviny, doplnky stravy, nikotinové výrobky, výrobky obsahujúce alkohol alebo ine látky môžu ovplyvniť výsledok testu.
- Technické alebo procedurálne chyby môžu viesť k nesprávnemu výsledku.
- Kontaminovaný, zriedený, imyšne upravený alebo inak nevhodná vzorka slin môže spôsobiť nesprávny výsledok.
- Test je určený výlučne pre vzorky ľudských slin.
- Test nie je určený na klinické, diagnostické ani terapeutické použitie.
- Na alkoholový indikátor môžu mať vplyv výpary alkoholu v okolitom prostredí, napríklad z dezinfekčných prostriedkov, parfumov, dezodorantov, čistiacich prostriedkov alebo iných výrobkov obsahujúcich alkohol.
- Požite alebo pravidelné používanie voľne dostupných prípravkov, istých vôd alebo iných výrobkov obsahujúcich alkohol môže viesť k pozitívnemu výsledku alkoholového indikátora.
- V prípade spomene, neočakávaného alebo predbežne pozitívneho výsledku je vhodné vykonať overenie špecializovanou laboratornou analytickou metódou, napríklad GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS alebo LC/MS/MS.
- Akkoľvek výsledek testu je potrebné posudzovať opatrne a v kontexte ďalších okolností.

#### ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

- Čo je potrebné urobiť pred testovaním? Najmenej 10 minút pred testovaním si nič nevykládejte do úst, nejzte, nepite, nefajčíte, nežuťte žuvačku, nepoužíajte tabákové ani nikotinové výrobky, nepoužíajte istnu vodu a nevyplachujte si ústa. Priprave si testovací zariadenie, časovač a farebnú stupnicu na odočítanie alkoholu, ak je súčasťou testu. Umyte si ruky, prečítajte si návod a nechať test dosiahnuť izbovú teplotu.
- Kedy mám odočítať výsledok? Výsledek testovacích proužkov odočítajte medzi 5 a 10. minútou. Po uplynutí 10 minút už výsledek testovacích proužkov neodčítajte. Výsledek alkoholového indikátora odočítajte do 1 minúty.
- Čo znamená slabá čiarka v testovacej oblasti (T)? Akákoľvek viditeľná čiarka v testovacej oblasti (T), aj keď je veľmi slabá, sa považuje za negatívny výsledek.
- Čo znamená, ak sa neobjaví kontrolná čiarka (C)? Výsledek je neplatný. Najčastejšou príčinou je nedostatočné množstvo vzorky, nesprávny postup alebo poškodený test. Test zopakujte s novým testovacím zariadením.
- Znamení pozitívny výsledek, že osoba je pod vplyvom alkoholu? Nie. Pozitívny výsledek iba orientačne ukazuje, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku slin je na úrovni hraničnej hodnoty testu alebo nad ňou, prípadne že alkoholový indikátor zmenil farbu podľa farebnej stupnice. Test neurčuje stupeň intoxikácie ani schopnosť osoby bezpečne konať, riadiť alebo pracovať.

17. Alkoholový indikátor je citlivý na prítomnosť alkoholu v okolitom prostredí. Test nevykonávajte v prostredí, kde sa nachádzajú výpary alkoholu, dezinfekčných prostriedkov, parfumov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol.

#### OBSAH BALENIA

Dodávaný materiál:

1× testovacie zariadenie

1× návod na použitie + farebná karta na odočítanie obsahu alkoholu (ak nie je vytlačená na obale)

Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou balenia:

1× časovač

#### SKLADOVANIE A STABILITA

- Skládejte v pôvodnom obale pri teplotě 2–30 °C.
- Chraňte pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplem.
- Nemrazte.
- Test je stabilný do dátumu expirácie uvedeného na obale, ak je skladovaný za predpisovaných podmienok.
- Po otvorení ochranného vrecka test použite čo najskôr, najneskôr do 1 hodiny.
- Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti.

#### SKLADOVANIE A STABILITA ALKOHOLOVÉHO TESTU

Alkoholový indikátor skládáje v uzavretom ochrannom vrecku pri teplotě 2–30 °C. Skladovanie pri teplotě nad 30 °C môže ovplyvniť funkciu alkoholového testu. Ak bol test skladovaný v chladu, pred otvorením vrecka ho nechaťe dosiahnuť izbovú teplotu.

#### ODEBRĚ A PŘÍPRAVA VZORKY

Najmenej 10 minút pred odberom vzorky si do úst nevykládejte nič. Pred testovaním nejzte, nepite, nežuťte žuvačku, nefajčíte, nepoužíajte tabákové ani nikotinové výrobky, nepoužíajte istnu vodu a nevyplachujte si ústa. Na tento test nepoužíajte žiadne iné ochranné pomôcky. Vzorek slin sa môže odobrať kedykoľvek počas dňa. Test vykonajte podľa nižšie uvedeného postupu ihneď po otvorení ochranného vrecka. Ak je v ústach nedostatočné množstvo slin, odber môže trvať dlhšie. Nedodržanie pokynov pred odberom alebo nedostatočné množstvo vzorky môže viesť k neplatnému alebo nesprávnemu výsledku.

#### VYKONANIE TESTU

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Uistite sa, že testovacie zariadenie má izbovú teplotu. Test vykonávajte pri teplotě 10–30 °C.
- Najmenej 10 minút pred testovaním si úst nič nevykládejte, nejzte, nepite, nefajčíte a nežuťte žuvačku.
- Vyberte testovacie zariadenie z uzavretého ochranného vrecka. Test použite čo najskôr.
- Uchopte testovacie zariadenie za rukoväť a odstráňte kryt, aby bola odkrytá absorpčná zberná časť.
- Vložte absorpční zbernú časť do úst a niekoľko sekúnd ňou potierajte vnútornú stranu oboch líc a jazyk. Potom umiestnite absorpčnú zbernú časť do stredu úst a pokračujte v odbere slin. Absorpčná časť sa má dotýkať jazyka alebo byť umiestnená pod jazykom.
- Počas odberu držte testovacie zariadenie vodorovne podľa znázorneného postupu. Nesprávná poloha testu počas odberu môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- Držte test v ústach, kým neuvádzite, že sliny začali prechádzať testovacím prúžkami. Potom testovacie zariadenie vyberte z úst.