

285 mm

CZ
Č. IFU-DOA-8-S-05, verze SJO

JOY TEST

8vl Test na drogy ze slin

Návod k použití

REF: JOY81DIS
Testované látky: **THC, MET, AMP, COC, MDMA, MOP, BZO, KET**
Vzorok: lidské sliny
Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
Vhodné pro samostatování.

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Test poskytuje pouze předběžný orientační výsledek a není určen pro stanovení diagnózy, klinické rozhodování ani terapeutické účely

URČENÉ POUŽITÍ
JOYTEST 8vl test na drogy ze slin je rychlý imunochromatografický screeningový test určený k orientačnímu zjištění přítomnosti vybraných drog a jejich metabolitů v lidských slinách.

Test je určen pro osobní, nemedicální a orientační použití. Výsledek testu je kvalitativní, tedy pouze ukazuje, zda je koncentrace testované látky ve vzorku slin nad nebo pod stanovenou mezní hodnotou testu (cut-off). Test neurčuje přesnou koncentraci látky ve slinách, míru intoxikace, dobu užívání ani způsob užívání látky.

Mezní hodnoty testu (cut-off) a látky, na které je test kalibrován, jsou uvedeny v následující tabulce:

Testovaná látka	Zkratka	Kalibrátor	Mezní hodnota/cut-off
Marhuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9-COOH	15 ng/ml
Metamfetamin	MET	d-metamfetamin	50 ng/ml
Amfetamin	AMP	d-amfetamin	50 ng/ml
Kokain	COC	benzoylcegonin	50 ng/ml
MDMA / extáze	MDMA	methylendioxymetamfetamin	50 ng/ml
Morfin	MOP	morfin	50 ng/ml
Benzo Diazepiny	BZO	oxazepam	50 ng/ml
Ketamin	KET	ketamin	50 ng/ml

Tento produkt není určen pro in vitro diagnostiku, klinické použití, stanovení diagnózy, léčbu ani rozhodování o zdravotním stavu. V případě potřeby potvrzení výsledku je nutné použít specializovanou laboratorní analytickou metodu.

SHRNUTÍ TESTOVANÝCH LÁTEK

Níže uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. Nejedná se o zdravotnické doporučení, diagnózu ani úplný popis účinků jednotlivých látek. Doba detekce ve slinách je vždy pouze orientační a může se lišit podle množství užití látky, tělesné užívatelnosti, způsobu užívání, metabolismu, zdravotního stavu, doby od posledního užití, použití mezní hodnoty testu a dalších individuálních faktorů. Test neslouží k posouzení aktuální schopnosti řídit vozidlo, obsluhovat stroje ani vykonávat jiné rizikové činnosti.

Marhuana / THC
THC, tedy Δ⁹-tetrahydrokanabinol, je hlavní psychoaktivní složka konopí. Test je kalibrován na 11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH, metabolit THC uvedený v tabulce výše. Ve slinách může být THC nebo související látky detekovatelné krátko po užití, zejména v důsledku přímého

kontaktu látky s dutinou ústní při kouření, vapořování nebo jiném způsobu užívání. Některé zdroje uvádějí možnost detekce THC ve slinách až po dobu přibližně 14 hodin po užití, tato doba je však pouze orientační a může se výrazně lišit. Užití THC může ovlivňovat vnímání, reakční dobu, koordinaci, paměť, pozornost a úsudek.

Metamfetamin / MET
Metamfetamin je silná stimulační látka chemicky příbuzná amfetaminu, s výrazným působením na centrální nervový systém. Test je kalibrován na d-metamfetamin uvedený v tabulce výše. Ve slinách může být metamfetamin detekovatelný krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až po dobu přibližně 72 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit podle způsobu užívání a individuálních faktorů. Užití metamfetaminu může ovlivnit bdělost, chování, vnímání, srdeční činnost, krevní tlak, schopnost soustředění a rozhodování.

Amfetamin / AMP
Amfetamin je stimulační látka působící na centrální nervový systém. Může mít i léčebné použití, ale bývá také zneužíván pro své stimulační účinky. Test je kalibrován na d-amfetamin uvedený v tabulce výše. Ve slinách může být amfetamin detekovatelný krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až po dobu přibližně 72 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit podle způsobu užívání a individuálních faktorů. Užití amfetaminu může ovlivnit bdělost, vnímání, chování, srdeční činnost, krevní tlak, schopnost soustředění a rozhodování.

Kokain / COC
Kokain je silná stimulační látka působící na centrální nervový systém. Test je kalibrován na benzoylcegonin, metabolit kokainu uvedený v tabulce výše. Kokain a jeho metabolity mohou být ve slinách detekovatelné krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až po dobu přibližně 24 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit podle způsobu užívání a individuálních faktorů. Užití kokainu může ovlivnit srdeční činnost, krevní tlak, chování, vnímání, rozhodování a pozornost.

Extáze / MDMA
MDMA, známá také jako 3,4-methylenoxyamfetamin, je syntetická látka se stimulačními a psychoaktivními účinky. Test je kalibrován na methylendioxymetamfetamin uvedený v tabulce výše. Přítomnost MDMA ve slinách může záviset na způsobu užívání, množství látky, době od užití, metabolismu a dalších individuálních faktorech. Užití MDMA může ovlivnit náladu, vnímání, srdeční činnost, krevní tlak, tělesnou teplotu, pozornost, rozhodování a spánek.

Morfin / MOP
Morfin je opiat používaný mimo jiné k tlumení bolesti a zároveň může být metabolitem jiných opiatů nebo opioidů. Test je kalibrován na morfin uvedený v tabulce výše. Morfin nebo související látky mohou být ve slinách detekovatelné po omezenou dobu po užití; orientační doba detekce se může lišit podle konkrétní látky, způsobu užívání, množství látky, metabolismu a dalších individuálních faktorů. Užití opiatů nebo opioidů může způsobit ospalost, zpomalení reakcí, útlum centrálního nervového systému, zhoršení koordinace a závažné zranění.

Benzo Diazepiny / BZO
Benzo Diazepiny jsou látky se uklidňujícími, hypnotickými, svalově relaxačními nebo protizáněbovými účinky. Test je kalibrován na oxazepam uvedený v tabulce výše. Jejich přítomnost ve slinách může záviset na konkrétní látce, dávce, době od užití a individuálních faktorech. Užití benzo Diazepinů může způsobit ospalost, zpomalení reakcí, snížení pozornosti, poruchy koordinace a svalovou relaxaci.

Ketamin / KET
Ketamin je látka používaná v humaní i veterinární medicíně, zejména v souvislosti s anestézií a analgézií. Zároveň může být zneužíván pro své psychokativní a disociativní účinky. Test je kalibrován na ketamin uvedený v tabulce výše. Přítomnost ketaminu ve slinách může záviset na způsobu užívání, množství látky, době od užití, metabolismu a dalších individuálních faktorech. Užití ketaminu může ovlivnit vnímání, koordinaci, úsudek, orientaci a reakční dobu; u některých osob se mohou objevit také zmatenost, halucinace nebo zvýšení krevního tlaku.

PRINCIP TESTU

JOYTEST 8vl test na drogy ze slin využívá princip imunochromatografické reakce založené na kompetitivní vazbě. Testovací zařízení je určeno k orientační detekci vybraných drog a jejich metabolitů ve vzorku lidských slin.

Vzorok slin je absorbován sběrnou částí testovacího zařízení a postupuje testem kapilárním působením. Pokud je koncentrace testované látky ve vzorku pod mezní hodnotou testu, vytvoří se v příslušné testovací oblasti (T) barevná linie. Pokud je koncentrace testované látky ve vzorku na úrovni mezní hodnoty testu nebo nad ní, příslušná testovací linie (T) se nevytvoří. V kontrolní oblasti (C) se musí vždy objevit kontrolní linie. Kontrolní linie potvrzuje, že byl použit dostatečný objem vzorku a že test proběhl správně.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

- Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
- Pouze pro použití se vzorkem lidských slin.
- Test je určen pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.
- Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Nepoužívejte test, pokud je ochranný sáček poškozený, otevřený nebo jinak narušený.
- Test ponechte v uzavřeném ochranném sáčku až do okamžiku použití.
- Po otevření ochranného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny.
- Neužívejte komponenty z různých sáčků.
- Nedočkujte se absorpční ani reakční části testovacího zařízení.
- Test nekladte do látké hloubky, než je nutné pro odběr slin podle návodu.
- Test nekontejte, nevyžvíkejte a nepolykejte.
- Test není určen k požití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě požití s nerespondováním barev požádejte o pomoc s odečtením výsledku jinou osobu.
- Nedodržením postupu, času odečtu nebo podmínek skladování může vést k nesprávnému výsledku.
- Po použití zlikvidujte test v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

Obsah balení

Dodávaný materiál:
1× testovací zařízení
1× návod k použití
Potřebný materiál, který není součástí balení:
1x časovač

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

- Skládejte v původním obalu při teplotě 2–30 °C.
- Chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a nadměrným teplem.
- Nezmrázte.
- Test je stabilní do data expirace uvedeného na obalu, pokud je skladován za předepsaných podmínek.
- Po otevření ochranného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

ODBER A PŘÍPRAVA VZORKU

Nejméně 10 minut před odběrem vzorku nevykládejte nic do úst. Před testováním nejzte, nepijte, nevyžvíkejte žvýkačku, nekuřte, nepoužívejte tabákové ani nikotinové výrobky a nevyplachujte ústa.

Pro tento test nepoužívejte žádné jiné uvedené pomůcky. Vzorok slin lze odebrat kdykoliv během dne. Test provedte podle níže uvedeného postupu ihned po otevření ochranného sáčku. Pokud je v ústech nedostatečné množství slin, může být odběr pomalejší. Nedodržení pokynů před odběrem nebo nedostatečné množství vzorku může vést k neplatnému nebo nesprávnému výsledku.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití		Číslo šarže
	Nepoužívejte opakovaně		Datum výroby
	Skladovací teplota		Obsahuje množství postačující pro n-o testů
	Výrobce		Spotřebujte do
	Chraňte před slunečním zářením		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a liže se návodem k použití
	Uchovávejte v suchu		Zmocnění zastupce v Evropském společenství/Evropské unii
	Dovozce		

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
No. 777 Jimingshan Road, High-Tech Development Zone, 230088 Hefei, Anhui, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail: sales@dlbluemedical.com

MedUnion S.L.
Carrer de Tapioles,33, 2-1, Barcelona, 08004, Spain
SRN: ES-AR-000019366
rep@themedunion.com

Czech Original Products s.r.o. - JOYMED.cz
Koulova 6, Praha 6, 160 00, Česká republika
IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771
www.joymed.cz obchod@joymed.cz
+420 608 284 065

Datum revize: 25. 6. 2026

SK

Č. IFU-DOA-8-S-05, verze SJO

JOY TEST

8vl Test na drogy zo slín

Návod na použitie

REF: JOY81DIS
Testované látky: **THC, MET, AMP, COC, MDMA, MOP, BZO, KET**
Vzorok: ľudské sliny

Iba na orientačné použitie. Nie je určený na diagnostické účely.

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Test poskytuje iba predbežný orientačný výsledok a nie je určený na stanovenie diagnózy, klinické rozhodovanie ani na terapeutické účely

URČENÉ POUŽITIE

JOYTEST 8vl test na drogy zo slín je rýchly imunochromatografický skríningový test určený na orientačné zistenie prítomnosti vybraných drog a ich metabolitů v ľudských slinách. Test je určený na osobné, nelekárske a orientačné použitie. Výsledok testu je kvalitatívny, t. j. iba ukazuje, či je koncentrácia testovanej látky vo vzorke slín nad alebo pod stanovenú hraničnú hodnotu testu (cut-off). Test neurčuje presnú koncentráciu látky v slinách, stupeň intoxikácie, dobu užívania ani spôsob užívania látky. Hrančné hodnoty testu (cut-off) a látky, na ktoré je test kalibrován, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Testovaná látka	Skratka	Kalibrátor	Hraničná hodnota/cut-off
Marhuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9-COOH	15 ng/ml
Metamfetamin	MET	d-metamfetamin	50 ng/ml
Amfetamin	AMP	d-amfetamin	50 ng/ml
Kokain	COC	benzoylcegonin	50 ng/ml
MDMA / extáza	MDMA	metylendioxymetamfetamin	50 ng/ml
Morfin	MOP	morfin	50 ng/ml
Benzo Diazepíny	BZO	oxazepam	50 ng/ml
Ketamín	KET	ketamín	50 ng/ml

Tento produkt nie je určený na in vitro diagnostiku, klinické použitie, stanovenie diagnózy, liečbu ani rozhodovanie o zdravotnom stave. V prípade potreby potvrdenia výsledku je nutné použiť špecializovanú laboratornú analytickú metódu.


PRÍEHAD TESTOVANÝCH LÁTOK

Níže uvedené informácie slúžia iba na všeobecnú orientáciu. Nejedná sa o zdravotné odporúčania, diagnózu ani úplný popis účinkov jednotlivých látok. Doba detekcie v slinách je vždy iba orientačná a môže sa líšiť v závislosti od množstva užití látky, frekvencie užívania, spôsobu užívania, metabolismu, zdravotného stavu, času od posledného užitia, použitia prahových hodnôt testu a ďalších individuálnych faktorov. Test neslúži na posúdenie aktuálnej schopnosti viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje ani vykonávať iné rizikové činnosti.

Marhuana / THC
THC, teda Δ⁹-tetrahydrokanabinol, je hlavná psychoaktívna zložka konope. Test je kalibrován na 11-nor-Δ⁹-THC-9-COOH, metabolit THC uvedený v tabulke výšie. V slinách môže byť THC alebo súvisiace látky detekovateľné krátko po užití, najmä v dôsledku priameho kontaktu látky s ústnou dutinou pri fajčení, vapořování alebo inom spôsobe užitia.

VYKONANIE TESTU

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Uistite sa, že testovacie zariadenie má izbovú teplotu. Test vykonajte pri teplotě 10–30 °C.
- Najmenej 10 minút pred testovaním si do úst nič nekladajte, nejedzte, nepijte, nefajčíte a nekuřte žuvačku.
- Vyberte testovacie zariadenie z uzavretého ochranného vrecka. Test použite čo najskôr.
- Uchovajte testovacie zariadenie za kováčik a odstráňte kryt, aby bola odkrytá absorpčná časť.
- Vložte absorpčnú zbernú časť do úst a niekoľko sekúnd ňou potierajte vnútornú stranu obou líb a jazyk. Potom umiestnite absorpčnú časť do úst a do úst ju pokračujte v odbere slín. Absorbovať časť sa má dotýkať jazyka alebo byť umiestnená pod jazykom.
- Počas odboru držte testovacie zariadenie vodorovne podľa zobrazeného postupu. Nesprávna poloha testu počas odboru môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- Akónáhle uvidíte, že sliny prechádzajú testovacím prúžkom, vyberte testovacie zariadenie z úst.
- Polohu testovacieho zariadenia na čistý a rovný povrch.
- Spasite časovač.
- Výsledok odočítajte medzi 5 a 10 minútou.
- Neodčítavajte výsledok po uplynutí 10 minút. Výsledok odočítaný po uplynutí tejto doby nemusí byť platný.

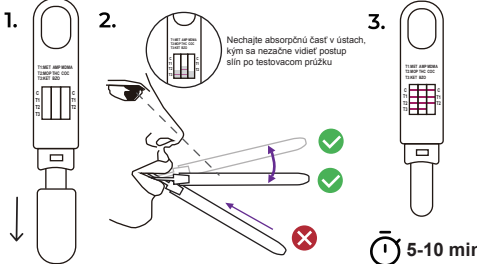

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Dôležité: Každý testovací prúžok sa vyhodnocuje samostatne. Pri každej testovanej látke musí byť prítomná kontrolná čiara (C), inak je výsledok pre daný prúžok neplatný.

V kontrolnej oblasti (C) sa objaví farebná čiarka a v príslušnej testovacej oblasti (T) sa takisto objaví farebná čiarka.

Negatívny výsledok

Negatívny výsledok znamená, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku slín je pod prahovou hodnotou testu alebo že látka nebola testom zistená. Intenzita testovacej čiary (T) sa môže líšiť. A) veľmi slabá testovacia čiara (T) sa považuje za negatívny výsledok.

V kontrolnej zóne (C) sa objaví farebná čiarka, avšak v príslušnej testovacej zóne (T) sa žiadna farebná čiarka neobjaví.

Predbežne pozitívny výsledok znamená, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku slín je na úrovni hraničnej hodnoty testu alebo nad ňou. Výsledok je iba orientačný a nesmie sa použiť ako jediný podklad pre definitívne závery alebo rozhodnutia. V prípade potreby je nutné výsledok overiť špecializovanou laboratórnou metódou.

Pozitívny výsledok

Pozitívny výsledok znamená, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku slín je nad hraničnou hodnotou testu alebo nad ňou. Výsledok je iba orientačný a nesmie sa použiť ako jediný podklad pre definitívne závery alebo rozhodnutia. V prípade potreby je nutné výsledok overiť špecializovanou laboratórnou metódou.

Některé zdroje uvádějí možnost detekce THC v slinách až přibližně 14 hodin po užití, tato doba je však iba orientačná a může se výrazně lišit. Užívání THC může ovlivňovat vnímání, reakční čas, koordinaci, paměť, pozornost a úsudek.

Metamfetamin / MET

Metamfetamin je silná stimulační látka chemicky příbuzná amfetaminu, s výrazným působením na centrální nervový systém. Test je kalibrován na d-metamfetamin uvedený v tabulce výše. Ve slinách může být metamfetamin detekovatelný krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až přibližně 72 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit v závislosti od způsobu užívání a individuálních faktorů. Užívání metamfetaminu může ovlivnit bdělost, spánkové, srdeční činnost, krevní tlak, schopnost soustředění, rozhodování a kontrolu impulsů.

Amfetamin / AMP

Amfetamin je stimulační látka působící na centrální nervový systém. Může mat i léčebné využití, ale často sa zneužívá pro svoje stimulačné účinky. Test je kalibrován na d-amfetamin uvedený v tabulce výše. Amfetamin môže byť v slinách zistiteľný krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až do přibližně 72 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit v závislosti od způsobu užívání a individuálních faktorů. Užívání amfetaminu může ovlivnit bdělost, vnímání, spánkové, srdeční činnost, krevní tlak, schopnost soustředění a rozhodování.

Kokain / COC

Kokain je silná stimulační látka působící na centrální nervový systém. Test je kalibrován na benzoylcegonin, metabolit kokainu uvedený v tabulce výše. Kokain a jeho metabolity môžu byť v slinách zistiteľné krátko po užití; některé zdroje uvádějí orientační možnost detekce až do přibližně 24 hodin po užití. Tato doba se může výrazně lišit v závislosti od způsobu užívání a individuálních faktorů. Užívání kokainu může ovlivnit srdeční činnost, krevní tlak, spánkové, vnímání, rozhodování a pozornost.

Extáze / MDMA

MDMA, známá aj ako 3,4-metylenldioxymetamfetamin, je syntetická látka so stimulačnými a psychoaktívnymi účinkami. Test je kalibrován na methylendioxymetamfetamin uvedený v tabulce výše. Prítomnosť MDMA v slinách môže závisieť od spôsobu užívania, množstva látky, času od užívania, metabolismu a ďalších individuálnych faktorov. Užívanie MDMA môže ovplyvniť náladu, vnímanie, srdcovú činnosť, krvný tlak, telesnú teplotu, pozornosť, rozhodovanie a spánek.

Morfin / MOP

Morfin je opiat používaný okrem iného na tlmenie bolesti a zároveň môže byť metabolitom niektorých iných opiatov alebo opioidov. Test je kalibrován na morfin uvedený v tabulke výše. Morfin alebo súvisiace látky môžu byť v slinách zistiteľné po obmedzenej dobe po užití; orientačná doba detekcie sa môže lišit v závislosti od konkrétnej látky, spôsobu užívania, množstva látky, metabolizmu a ďalších individuálnych faktorov. Užívanie opiatov alebo opioidov môže spôsobiť ospalosť, spomalenie reakcií, útlm centrálného nervového systému, zhoršenie koordinácie a zníženie zrenie.

Benzo Diazepíny / BZO

Benzo Diazepíny sú látky s upokojujúcimi, tlmiacimi, hypnotickými, svalovo relaxačnými alebo antispasmodickými účinkami. Test je kalibrován na oxazepam uvedený v tabulke výše. Ich prítomnosť v slinách môže závisieť od konkrétnej látky, dávky, času od užitia a individuálnych faktorov. Užívanie benzo Diazepínov môže spôsobiť ospalosť, spomalenie reakcií, zníženie pozornosti, poruchy koordinácie a svalová relaxácia.

Ketamin / KET

Ketamin je látka používaná v humannej aj veterinárnej medicíne, najmä v súvislosti s anestéziou a analgéziou. Zároveň môže byť zneužívaný pre svoje psychokativné a disociatívne účinky. Test je kalibrován na ketamín uvedený v tabulke výše. Prítomnosť ketamínu v slinách môže závisieť od spôsobu užívania, množstva látky, času od užívania, metabolismu a ďalších individuálnych faktorov. Užívanie ketamínu môže ovplyvniť vnímanie, koordináciu, úsudek, orientáciu a reakčný čas; u niektorých osôb sa môžu vyskytnúť aj zmatenosti, halucinácie alebo zvýšenie krvného tlaku.

PRINCÍP TESTOVANIA

Test na drogy zo slín JOYTEST 8vl využíva princíp imunochromatografickej reakcie založenej na kompetitívnej väzbe. Testovacie zariadenie je určené na orientačnú detekciu vybraných drog a ich metabolitov vo vzorku ľudských slín.

Vzorok slín je absorbovaná zbernou časťou testovacieho zariadenia a testom prechádza kapilárnym pôsobením. Ak je koncentrácia testovanej látky vo vzorku nižšia ako prahová hodnota testu, v príslušnej testovacej oblasti (T) sa vytvorí farebná čiarka. Ak je koncentrácia testovanej látky vo vzorku na úrovni prahovej hodnoty testu alebo vyššia, príslušná testovacia oblasť (T) sa nevytvorí.

V kontrolnej oblasti (C) sa musí vždy objaviť kontrolná čiarka. Kontrolná čiarka potvrdzuje, že bol použitý dostatočný objem vzorku a že test prebehol správne.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA

- Iba na orientačné použitie. Nie je určený na diagnostické účely.
- Určené výlučne na použitie so vzorkom ľudských slín.
- Test je určený na jednorázové použitie. Nepoužívať ho opakovane.
- Test nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
- Test nepoužívať, ak je ochranný sáček poškodený, otvorený alebo inak narušený.
- Test nekuřte, nekuřte a nevyžvíkejte.
- Po otvorení ochranného vrecka test použite čo najskôr, najneskôr do 1 hodiny.
- Nemiešajte komponenty z rôznych sáčkov.
- Nedočkajte sa absorpčnej ani reakčnej časti testovacieho zariadenia.
- Nedočkajte sa absorpčnej ani reakčnej časti testovacieho zariadenia.
- Test nekuřte, nekuřte a nevyžvíkejte.
- Test nie je určený na požitie.
- Uchovávať mimo dosah detí.
- Ak máte problémy s rozpoznaním farieb, požiadajte inú osobu o pomoc pri odočítaní výsledku.
- Nedodržaním postupu, času odočítania alebo podmienok skladovania môže viesť k nesprávnemu výsledku.
- Po použití zlikvidujte test v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

Obsah balenia

Dodávaný materiál:
1× testovacie zariadenie
1× návod na použitie
Potrebný materiál, ktorý nie je súčasťou balenia:
1x časovač

SKLADOVANIE A STABILITA

- Skládejte v pôvodnom obale pri teplote 2–30 °C.
- Chraňte pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplom.
- Nezmrázajte.
- Test je stabilný do dátumu expirácie uvedeného na obale, ak je skladovaný za predpísaných podmienok.
- Po otvorení ochranného vrecka test použite čo najskôr, najneskôr do 1 hodiny.
- Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti.

ODBER A PRÍPRAVA VZORKY

Najmenej 10 minút pred odberom vzorky si do úst nič nekladajte. Pred testovaním nejedzte, nepijte, nekuřte žuvačku, nefajčíte, nepoužíajte tabákové ani nikotinové výrobky a nevyplachujte ústa.

Na tento test nepoužíajte žiadne iné uvedené pomôcky. Vzorok slín sa môže odobrať kedykoľvek počas dňa. Test provedte podľa nižšie uvedeného postupu ihneď po otvorení ochranného sáčku.

Ak je v ústach nedostatočné množstvo slín, odber môže byť ťažší. Nedodržanie pokynov pred odberom alebo nedostatočné množstvo vzorku môže viesť k neplatnému alebo nesprávnemu výsledku.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Přečtěte si návod na použití		Číslo šarže
	Nepoužívejte opakovane		Datum výroby
	Skladovací teplota		Obsahuje množství postačující pro n-o testů
	Výrobce		Spotřebujte do
	Chraňte před slunečním žiarením		Nepoužívejte, ak je obal poškodený, a postupujte podľa návodu na použitie
	Skladujte na suchom mieste		Zmocnený zastupca v Európskom společenstve/Európskej únii
	Dovozce		

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
No. 777 Jimingshan Road, High-Tech Development Zone, 230088 Hefei, Anhui, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail: sales@dlbluemedical.com

MedUnion S.L.
Carrer de Tapioles,33, 2-1, Barcelona, 08004, Spain
SRN: ES-AR-000019366