

285 mm

CZ
Č. IFU-DOA-U-03&04, verze S/3

JOY TEST

8vl Test na drogy z moči

Návod k použití

REF: JOY81DU
Testované látky: **THC, MET, AMP, COC, MDMA, MOP, BZO, KET**
Vzorek: lidská moč
Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
Vhodné pro samostatnou.

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Test poskytuje pouze předběžný orientační výsledek a není určen pro stanovení diagnózy, klinické rozhodování ani terapeutické účely.

URČENÉ POUŽITÍ

JOYTEST 8vl Test na drogy z moči je rychlý imunochromatografický screeningový test určený k orientačním zjištění přítomnosti vybraných návykových látek a/nebo jejich metabolitů v lidské moči.

Test je určen pro osobní, nemedicinské a orientační použití. Výsledek testu je kvalitativní, tedy pouze ukazuje, zda je koncentrace testované látky ve vzorku moči nad nebo pod stanovenou mezní hodnotou testu (cut-off). Test neurčuje přesnou koncentraci látky v moči, míru intoxikace, dobu účinku ani způsob užívání látky.


Tento produkt není určen pro in vitro diagnostiku, klinické použití, stanovení diagnózy, léčbu ani rozhodování o zdravotním stavu. V případě potřeby potvrzení výsledku je nutné použít specializovanou laboratorní analytickou metodu.

Testovaná látka	Zkratka	Kalibrátor	Mezní hodnota/cut-off
Marihuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	50 ng/ml
Metamfetamin	MET	đ-metamfetamin	1000 ng/ml
Amfetamin	AMP	đ-amfetamin	1000 ng/ml
Kokain	COC	benzoylchgonin	300 ng/ml
MDMA / extáze	MDMA	3,4-methylenoxyamfetamin	500 ng/ml
Morfin	MOP	morfin	300 ng/ml
Benzoilazepiny	BZO	oxazepam	300 ng/ml
Ketamin	KET	ketamin	1000 ng/ml

SHRNUTÍ TESTOVANÝCH LÁTEK

Níže uvedené informace slouží pouze pro obecnou orientaci. Nejodná se o zdravotnické doporučení, diagnózu ani úplný popis účinků jednotlivých látek. Doba detekce v moči je vždy pouze orientační a může se lišit podle množství užití látky, četnosti užívání, metabolismu, hydratace, zdravotního stavu, pH moči, použité mezní hodnoty testu a dalších individuálních faktorů.

- Vyjňte testovací zařízení z uzavřeného ochranného sáčku. Test použijte co nejdříve.
- Sejměte kryt testovacích průzků.
- Držte testovací zařízení vlně a ponorte spodní část testovacích průzků do vzorku moči na 10–15 sekund. Dbejte na to, aby hladina moči nepřesáhla vyznačenou maximální úroveň na testu.
- Vyjňte test ze vzorku moči, nasaďte zpět kryt a položte testovací zařízení na čistý, rovň a nemazavý povrch.
- Spusťte časovač.
- Výsledek odečtěte mezi 5. a 10. minutou.
- Neodečítávejte výsledek po uplynutí 10 minut. Výsledek odečtený po této době nemusí být platný.

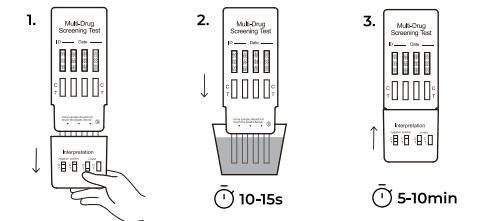

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Důležité: Každý testovací proužek se hodnotí samostatně. U každé testované látky musí být přítomna kontrolní linie (C), jinak je výsledek pro daný proužek neplatný.

Neplatný výsledek:

V kontrolní oblasti (C) se objeví barevná linie a v testovací oblasti (T) se objeví také barevná linie.
Negativní výsledek znamená, že koncentrace testované látky ve vzorku moči je pod mezní hodnotou testu nebo že látka byla testem zjištěna. Imuniza testovací linie (T) se může lišit. I velmi slabá testovací linie (T) se považuje za negativní výsledek.

Pozitivní výsledek:

V kontrolní oblasti (C) se objeví barevná linie, ale v testovací oblasti (T) se neobjeví žádná barevná linie.
Předběžně pozitivní výsledek znamená, že koncentrace testované látky ve vzorku moči je na úrovni mezní hodnoty testu nebo nad ní. Výsledek je pouze orientační a nesmí být použit jako jediný podklad pro definitivní závěry nebo rozhodnutí. V případě pochyb je nutné výsledek ověřit specializovanou laboratorní metodou.

Marihuana / THC

THC je hlavní psychoaktivní složka konopí. Může ovlivňovat vnímání, reakční dobu, koordinaci, paměť, pozornost a schopnost bezpečně řídit nebo obsluhovat stroje. U častého užívání se metabolisme THC mohou v organismu držet déle než u jednorázového užití. Orientační doba detekce v moči se může pohybovat od několika dnů až po několik týdnů u pravidelných uživatelů.

Metamfetamin / MET

Metamfetamin, v České republice často označovaný jako pervitin, patří mezi silné stimulanty látky. Může zvyšovat bdělost, aktivitu, tepovou frekvenci a krevní tlak, ale současně může vést k úzkosti, nespavosti, podrážděnosti, vyčerpání a rizikovému chování. Orientační doba detekce v moči bývá obvykle několik dnů.

Amfetamin / AMP

Amfetamin je stimulant látky ovlivňující centrální nervový systém. Může zvyšovat energii, bdělost a soustředění, ale také vyvolat nespá, úzkost, nespavost, zvýšenou tepovou frekvenci a další nežádoucí účinky. Orientační doba detekce v moči bývá obvykle 1–3 dny, u některých osob déle.

Kokain / COC

Kokain je silná stimulant látky. V moči se obvykle detekuje jeho metabolit benzoylekgonin. Užívání kokainu může být spojeno se zvýšenou energií, euforií a sebedůvěrou, ale také s úzkostí, podrážděností, kardiovaskulárními riziky a vyčerpáním. Orientační doba detekce v moči bývá obvykle několik dnů, u častého užívání může být delší.

MDMA / extáze

MDMA je psychoaktivní látka se stimulačními a empatogenními účinky. Může ovlivňovat náladu, vnímání, tělesnou teplotu, srdeční činnost a hydrataci organismu. Užívání může být spojeno s rizikem přehřátí, dehydratace, vyčerpání a následných psychických obtíží. Orientační doba detekce v moči bývá obvykle 1–3 dny.

Morfin / MOP

Morfin patří mezi opiaty. Opiáty mohou mít tlumivé a analgetické účinky a mohou ovlivňovat vědomí, koordinaci, reakční dobu a dýchání. Zneužívání opiatů je spojeno s rizikem závislosti a předávkování. Orientační doba detekce v moči se může pohybovat od desítek hodin po několik dnů, u některých látek a způsobů užívání může být delší.

Benzoilazepiny / BZO

Benzoilazepiny jsou látky obsažené v některých léčivých přípravcích používaných například při úzkosti, nespavosti nebo křečových stavech. Mohou způsobovat ospalost, útlum, zhoršení koordinace, zpomalení reakce a poruchy paměti. Doba detekce v moči může být velmi rozdílná podle konkrétní látky, dávky a četly užívání; může se pohybovat od několika dnů až po delší dobu u dlouhodobého užívání.

Ketamin / KET

Ketamin je látka s dissociativními účinky, která může ovlivnit vnímání těla, okolí, koordinaci, paměť a úsudek. Zneužívání může být spojeno s dezorientací, útlumem, poruchami motoriky, nevolností a dalšími riziky. Orientační doba detekce v moči bývá obvykle několik dnů, ale může se lišit podle individuálních okolností.

PRINCIP TESTU

JOYTEST 8vl Test na drogy z moči využívá princip imunochromatografické reakce. Test se skládá z několika samostatných testovacích průzků, z nichž každý je určen pro detekci konkrétní látky nebo skupiny látek.

Vzorek moči postupuje testovacím proužkem kapilárním působením. Pokud je koncentrace testované látky ve vzorku pod mezní hodnotou testu, vytvoří se v testovací oblasti (T) barevná linie. Pokud je koncentrace testované látky nad mezní hodnotou testu, testovací linie (T) se u přiléhavé látky nevytvoří.

V kontrolní oblasti (C) se musí vždy objevit kontrolní linie. Kontrolní linie potvrzuje, že byl použit dostatečný objem vzorku a že test proběhl správně.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

- Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
- Pouze pro použití ve vzorkem lidské moči.
- Test je určen pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.
- Nepoužívejte test po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Nepoužívejte test, pokud je ochranný sáček poškozený, otevřený nebo jinak narušený.
- Test ponechte v uzavřeném ochranném sáčku až do okamžiku použití.
- Po otevření ochranného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny.
- Nemějtejte komponenty z různých sadů.
- Nedotýkejte se reakční části testovacích průzků.
- Zabraňte záměně nebo kontaminaci vzorků.
- Pro každý vzorek použijte čistou a suchou nádobu.
- Všechny vzorky moči považujte za potenciálně biologicky rizikový materiál.
- Po použití zlikvidujte test a vzorek v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Test není určen k požití. Nepolykejte.
- V případě požití s rozpoznáváním barev požádejte o pomoc s odečtením výsledku jinou osobu.
- Nedodržení postupu, času odečtu nebo podmínek skladování může vést k nesprávnému výsledku.

OBSAH BALENÍ

Dodávaný materiál:
1× testovací zařízení
1× návod k použití

Potřebný materiál, který není součástí balení:
1× čista a suchá nádoba na odběr moči
1× časovač

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

- Skládejte v původním obalu při teplotě 2–30 °C.
- Chraňte před přímým slunečním zářením, vlhkostí a nadměrným teplem.
- Nezmrázte.
- Test je stabilní do data expirace uvedeného na obalu, pokud je skladován za předepsaných podmínek.
- Po otevření ochranného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 1 hodiny.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

Vzorek moči odeberte do čisté a suché nádoby. Lze použít moč odebranou kdykoliv během dne. Vzorek moči nesmí být viditelně kontaminovaný. Příměsi, jako jsou bělidla, chemikálie, nadměrné ředění nebo jiné pokusy o ovlivnění vzorku, mohou způsobit nesprávné výsledky. Pokud existuje podezření na ovlivnění nebo záměnu vzorku, doporučuje se provést nový test s novým vzorkem moči. Vzorky obsahující viditelné částice nebo slabožny nechte usadit, případně je přefiltrujte, aby byl získán čistý vzorek vhodný pro testování. Pokud není test proveden ihned, lze vzorek moči před testováním skladovat při teplotě 2–8 °C po dobu až 48 hodin. Pro delší skladování lze vzorek zmrazit a uchovávat při teplotě nižší než –20 °C. Zmrazený vzorek musí být před testováním zcela rozmrazen a dobře promíchán. Před provedením testu nechte testovací zařízení a vzorek moči dosáhnout pokojové teploty.

PROVEDENÍ TESTU

Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Ujistěte se, že testovací zařízení i vzorek moči mají pokojovou teplotu.

LIKVIDACE

Použitý test, vzorek moči a související materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Použitý test považujte za potenciálně biologicky rizikový materiál. Test je jednorázový a nesmí být použit opakovaně.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití		Číslo šarže
	Nepoužívejte opakovaně		Datum výroby
	Skládací teplota		Obsahuje množství postačující pro <no> testů
	Výrobce		Spotřebujte do
	Chraňte před slunečním zářením		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a hře se návodem k použití
	Uchovávejte v suchu		Značený zástupce v Evropském společenství/Evropské unii
	Dovozce		

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 777 Jinning Road, High-Tech Development Zone, 230088 Hefei, Anhui, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail:sales@dbbluemedical.com

MedUnion S.L.
Carrer de Tàpies,33, 2-1, Barcelona, 08004, Spain
SRN: ES-AR-000019366 rep@themedunion.com

Czech Original Products s.r.o. - JOYMED.cz
Kaulova 6, Praha 6, 160 00, Česká republika
IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771
www.joymed.cz obchod@joymed.cz +420 608 284 065

Datum revize: 30. 4. 2025

SK

Č. IFU-DOA-U-03&04, verze S/3

JOY TEST

8vl Test na drogy z moči

Návod k použití

REF: JOY81DU
Testované látky: **THC, MET, AMP, COC, MDMA, MOP, BZO, KET**
Vzorek: lidská moč
Pouze pro orientační použití. Není určeno pro diagnostické účely.
Vhodné na samostatnou.

Před použitím si pozorně přečtěte celý návod na použití. Test poskytuje iba předběžný orientační výsledek a nie je určený na stanovenie diagnózy, klinické rozhodovanie ani terapeutické účely.

URČENÉ POUŽITIE

JOYTEST 8vl Test na drogy z moči je rýchly imunochromatografický skríningový test určený na orientačné zistenie prítomnosti vybraných návykových látok alebo ich metabolitov v ľudskom moči.

Test je určený na osobné, nelekárske a orientačné použitie. Výsledok testu je kvalitativný, t. j. iba ukazuje, či je koncentrácia testovanej látky vo vzorku moču nad alebo pod stanovenou hraničnou hodnotou testu (cut-off). Test neurčuje presnú koncentráciu látky v moči, stupeň intoxikácie, dobu účinku ani spôsob užívania látky.

Tento produkt nie je určený na in vitro diagnostiku, klinické použitie, stanovenie diagnózy, liečbu ani rozhodovanie o zdravotnom stave. V prípade potreby potvrdenia výsledku je nutné použiť specializovanú laboratórnu analytickú metódu.


Testovaná látka	Skratka	Kalibrátor	Hraničná hodnota/cut-off
Marihuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	50 ng/ml
Metamfetamin	MET	đ-metamfetamin	1000 ng/ml
Amfetamin	AMP	đ-amfetamin	1000 ng/ml
Kokain	COC	benzoylchgonin	300 ng/ml
MDMA / extáza	MDMA	3,4-metylenoxyamfetamin	500 ng/ml
Morfin	MOP	morfin	300 ng/ml
Benzoilazepiny	BZO	oxazepam	300 ng/ml
Ketamin	KET	ketamin	1000 ng/ml

SŮHRN TESTOVANÝCH LÁTEK

Níže uvedené informace slouží iba na všeobecnou orientáciu. Nejedná sa o zdravotné odporúčania, diagnózu ani úplný popis účinkov jednotlivých látok. Doba detekcie v moči je vždy iba orientačná a môže sa líšiť v závislosti od množstva užití látky, frekvencie užívania, metabolismu, hydratacie, zdravotného stavu, pH moči, použitých hraničných hodnôt testu a ďalších individuálnych faktorov.

VYKONANIE TESTOVANIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Uistite sa, že testovacie zariadenie aj vzorka moču majú izbovú teplotu.
- Vyberte testovací zariadenie z uzavretého ochranného vrecka. Test použite čo najskôr.
- Odstaňte kryt testovacích průzků.
- Držte testovací zariadenie vo zvislej polohe a ponorte spodnú časť testovacích průzků do vzorky moču na 10–15 sekúnd. Dbejte na to, aby hladina moču neprekročila vyznačenú maximálnu úroveň na teste.
- Vyberte test z vzorky moči, nasaďte späť kryt a položte testovacie zariadenie na čistý, rovný a neobšerujúci povrch.
- Spusťte časovač.
- Výsledek odečítajte medzi 5. a 10. minútou.
- Neodčítavajte výsledek po uplynutí 10 minút. Výsledek odečítaný po uplynutí tejto doby nemusí byť platný.

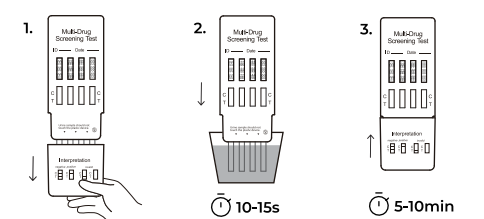

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Dôležité: Každý testovací príznak sa hodnotí samostatne. Pri každej testovanej látke musí byť prítomná kontrolná čiara (C), inak je výsledek pre daný príznak neplatný.

Negatívny výsledek:

V kontrolnej oblasti (C) sa objaví farebná čiara a v testovacej oblasti (T) sa tiež objaví farebná čiara.
Negatívny výsledek znamená, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku moču je pod hranicou testu alebo že látka nebola testom zistená. Intenzita testovacej čiary (T) sa môže líšiť. Aj veľmi slabá testovacia čiara (T) sa považuje za negatívny výsledek.

Pozitívny výsledek:

V kontrolnej oblasti (C) sa objaví farebná čiara, ale v testovacej oblasti (T) sa žiadna farebná čiara neobjaví.
Předběžně pozitivní výsledek znamená, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku moču je na úrovni hraničnej hodnoty testu alebo ju prekračuje. Výsledek je iba orientačný a nesmie slúžiť ako jediný podklad pre definitívne závery alebo rozhodnutia. V prípade potreby je nutné výsledek overiť specializovanou laboratórnu metódou.

Marihuana / THC

THC je hlavná psychoaktívna zložka konopí. Může ovlivňovat vnímání, reakční čas, koordinaci, paměť, pozornost a schopnost bezpečně řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. Při častém užívání se metabolisme THC může v organismu udržet déle ako pri jednorázovom užití. Orientačná doba detekcie v moči sa môže pohybovať od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov u pravidelných užívateľov.

Metamfetamin / MET

Metamfetamin, v Českej republike často označovaný ako pervitin, patrí medzi silné stimulanty látky. Může zvyšovať bdelosť, aktivitu, srdcovú frekvenciu a krvný tlak, ale zároveň môže viesť k úzkosti, nespavosti, podrážděnosti, vyčerpání a rizikovému správaniu. Orientačná doba detekcie v moči je zvyšujúce niekoľko dní.

Amfetamin / AMP

Amfetamin je stimulant látky pôsobiaca na centrálny nervový systém. Může zvyšovať energiu, bdelosť a sústredenie, ale tiež zvyšovať napätie, úzkosť, nespavosť, zvýšenú srdcovú frekvenciu a ďalšie nežiaduce účinky. Orientačná doba detekcie v moči je zvyšujúce 1–3 dni, u niektorých osôb aj dlhšie.

Kokain / COC

Kokain je silná stimulant látky. V moči sa zvyšujúce detekuje jeho metabolit benzoylekgonin. Užívanie kokainu môže byť spojené so zvýšenou energiou, euforiou a sebedúfou, ale aj s úzkosťou, podrážděnosťou, kardiovaskulárnymi rizikami a vyčerpáním. Orientačná doba detekcie v moči je zvyšujúce niekoľko dní, pri častom užívaní môže byť dlhšia.

MDMA / extáza

MDMA je psychoaktívna látka so stimulačnými a empatogénnymi účinkami. Může ovplyvňovať náladu, vnímanie, telesnú teplotu, srdcovú činnosť a hydratáciu organizmu. Užívanie môže byť spojené s rizikom prehriatia, dehydratacie, vyčerpání a následných psychických ťažkostí. Orientačná doba detekcie v moči je zvyšujúce 1–3 dni.

Morfin / MOP

Morfin patrí medzi opiaty. Opiáty môžu mať tlmiace a analgetické účinky a môžu ovplyvňovať vedomie, koordináciu, reakčný čas a dýchanie. Zneužívanie opiatov je spojené s rizikom závislosti a predávkovania. Orientačná doba detekcie v moči sa môže pohybovať od desiatok hodín po niekoľko dní; pri niektorých látkach a spôsoboch užívania sa môže líšiť.

Benzoilazepiny / BZO

Benzoilazepiny sú látky obsiahnuté v niektorých liekoch používaných napríklad pri úzkosti, nespavosti alebo kŕčoch. Může spôsobiť ospalosť, útlum, zhoršenie koordinácie, spomalenie reakcie a poruchy pamäte. Doba detekcie v moči sa môže veľmi líšiť v závislosti od konkrétnej látky, dávky a dĺžky užívania; môže sa pohybovať od niekoľkých dní až po dlhšie obdobie pri dlhodobom užívaní.

Ketamin / KET

Ketamin je látka s dissociatívnymi účinkami, ktorá môže ovplyvniť vnímanie tela, okolia, koordináciu, pamäť a úsudok. Zneužívanie môže byť spojené s dezorientáciou, útlumom, poruchami motoriky, nevoľnosťou a ďalšími rizikami. Orientačná doba detekcie v moči je zvyšujúce niekoľko dní, ale môže sa líšiť v závislosti od individuálnych okolností.

PRINCÍP TESTOVANIA

JOYTEST 8vl Test na drogy z moči využívá princíp imunochromatografickej reakcie. Test sa skladá z niekoľkých samostatných testovacích průzkův, z ktorých každý je určený na detekciu konkrétnej látky alebo skupiny látok.

Vzorka moču postupuje testovacím průzkom kapilárnym pôsobením. Ak je koncentrácia testovanej látky vo vzorku pod hraničnou hodnotou testu, v testovacej oblasti (T) sa vytvorí farebná čiara. Ak je koncentrácia testovanej látky nad hraničnou hodnotou testu, testovacia čiara (T) sa pri príslušnej látke nevytvorí.

V kontrolnej oblasti (C) sa musí vždy objaviť kontrolná čiara. Kontrolná čiara potvrzuje, že bol použitý dostatočný objem vzorky a že test prebehol správne.

Neplatný výsledek:

V kontrolnej oblasti (C) sa neobjaví žiadna farebná čiara, bez ohľadu na to, či sa čiara objaví alebo neobjaví v testovacej oblasti (T).
Neplatný výsledek môže byť spôsobený nedostatočným množstvom vzorky, nesprávnym postupom, poškodeným testom alebo inou chybou. Test zopakujte s novým testovacím zariadením a novou vzorkou moču.

KONTROLA KVALITY

Kontrolná čiara (C) slúži ako interná kontrola postupu. Jej zobrazenie potvrdzuje, že bol použitý dostatočný objem vzorky a že vzorka správne prešla testovacím průzkom.

OBMEZDENIA METÓDY

- Test poskytuje iba kvalitatívny, předběžný a orientačný výsledek.
- Test neurčuje presnú koncentráciu látky v moči.
- Positívny výsledek neznamená stupeň intoxikácie, spôsob užívania, dobu účinku ani množstvo užití látky.
- Negatívny výsledek nevylučuje prítomnosť látky vo vzorku. Látka môže byť prítomná pod hranicou citlivosti testu.
- Test nerozlišuje medzi niektorými návykovými látkami a niektorými liekmi alebo ich metabolitmi.
- Niektoré lieky, potraviny, doplnky stravy alebo iné látky môžu ovplyvniť výsledek testu.
- Technické alebo procedurálne chyby môžu viesť k nesprávnemu výsledku.
- Kontaminovaná, zriedená, umyšľane upravená alebo inak nevhodná vzorka moču môže spôsobiť negatívny výsledek.
- Test je určený iba pre vzorky ľudskej moči.
- Test nie je určený na klinické, diagnostické ani terapeutické použitie.
- V prípade sporu, neokázavého alebo předběžně pozitivného výsledku je vhodné vykonať overenie specializovanou laboratórnu analytickou metódou, napríklad GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS alebo LC/MS/MS.
- Akkoľvek výsledek testu je potrebné používať opatrne a v kontexte ďalších okolností.

ČASŤE OTÁZKY A ODPOVEĎE

- Čo je potrebné urobiť pred testovaním?
Príprave si čistu a suchú nádobu na moč, časovač a testovacie zariadenie. Umyte si ruky, prečítajte si návod a nechaajte test aj vzorku dosiahnuť izbovú teplotu.
- Kedy mám odečítať výsledek?
Výsledek odečítajte medzi 5 a 10. minútou. Po uplynutí 10 minút už výsledek neodčítajte.
- Co znamená slabá čiara v testovacej oblasti (T)?
Akkoľvek viditeľná čiara v testovacej oblasti (T), aj veľmi slabá, sa považuje za negatívny výsledek.
- Co znamená, ak sa neobjaví kontrolná čiara (C)?
Výsledek je neplatný. Najčastejšou príčinou je nedostatočný objem vzorky, nesprávy postup alebo poškodený test. Test zopakujte s novým testovacím zariadením.
- Znamená pozitívny výsledek, že osoba je pod vplyvom omamných látok?
Nie. Pozitívny výsledek iba orientačne ukazuje, že koncentrácia testovanej látky vo vzorku moču je na úrovni hraničnej hodnoty testu alebo nad ňou. Test neurčuje mieru intoxikácie ani schopnosť osoby bezpečne konať, riadiť alebo pracovať.
- Znamená negatívny výsledek, že vo vzorku nie je žiadna droga?
Nie nevyhnutne. Látka môže byť prítomná v koncentracii nižšej, ako je hraničná hodnota testu, alebo mimo detekčnej možnosti testu.
- Je možné použiť test po uplynutí doby použiteľnosti?
Nie. Po uplynutí doby použiteľnosti nemôžete zaručiť správnu funkciu testu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNĚNIA A OPATRENIA

- Iba na orientačné použitie. Nie je určený na diagnostické účely.
- Iba na použitie na vzorku ľudskej moči.
- Test je určený na jednorázové použitie. Nepoužívať ho opakovan.
- Test nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.
- Test nepoužívať, ak je ochranný obal poškodený, otvorený alebo inak narušený.
- Test nechať v uzavretom ochrannom vrecku až do okamihu použitia.
- Po otvorení ochranného vrecka test použite čo najskôr, najneskôr do 1 hodiny.
- Nedotýkajte sa reakčnej časti testovacích průzkův.
- Zabraňte záměne alebo kontaminácii vzorku.
- Pre každú vzorku použite čistú a suchú nádobu.
- Všetchny vzorky moču považujte za potenciálne biologicky nebezpečný materiál.
- Po použití zlikvidujte test a vzorku v súlade s miestnymi předpismi pre nakladanie s odpadom.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Test nie je určený na požitie. Nehltajte.
- V prípade ťažk